

COMPOSITE HÍBRIDO SUBMICRÓNICO UNIVERSAL

BRILLIANT EverGlow™

El arte del brillo





EL ARTE DEL BRILLO

DISPONER DE UN MATERIAL RESTAURADOR FÁCIL DE MANEJAR, ESTÉTICO Y DURADERO ES UN DESEO MUY DESTACADO ENTRE LOS PROFESIONALES.

BRILLIANT EverGlow es un material que satisface esta demanda sin hacer concesiones. El composite de última generación es adecuado para las restauraciones anteriores y posteriores, y ofrece el equilibrio perfecto entre una manipulación sencilla y práctica, unas propiedades miméticas excelentes y un brillo duradero.

- Pulido excepcional y brillo duradero
- Restauraciones estéticas con una sola tonalidad
- Consistencia suave para una manipulación ideal
- Excelente humectabilidad sobre la superficie dental preparada



PULIDO EXCEPCIONAL Y BRILLO DURADERO

BRILLIANT EVERGLOW ES UN COMPOSITE HÍBRIDO SUBMICRÓNICO UNIVERSAL.

Gracias a la sofisticada composición de su relleno, BRILLIANT EverGlow proporciona de forma inmediata una superficie increíblemente suave con un brillo satinado directamente después de la colocación del material. Esto relega el pulido a un segundo plano y permite conseguir unas restauraciones altamente estéticas de modo casi inmediato. Además, el versátil material de obturación destaca por su increíble conservación del brillo.



Prepulido (p. ej. con DIATECH COMPREPOL PLUS)




Pulido de brillo (p. ej. con DIATECH COMPOSHINE PLUS)



Fácil de pulir para conseguir de manera instantánea un resultado final brillante


CONSERVACIÓN DEL BRILLO ¹

Después de la exposición al simulador del cepillado dental, medido en unidades de brillo (UB)

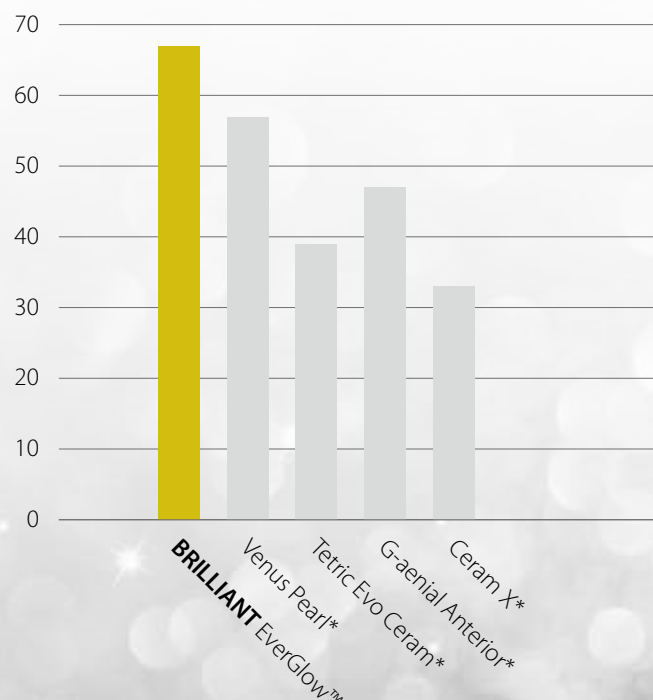

Incluso después de 6.000 ciclos en el simulador del cepillado dental, BRILLIANT EverGlow conserva de un modo excelente su brillo inicial.

EVALUACIÓN DEL PULIDO ¹

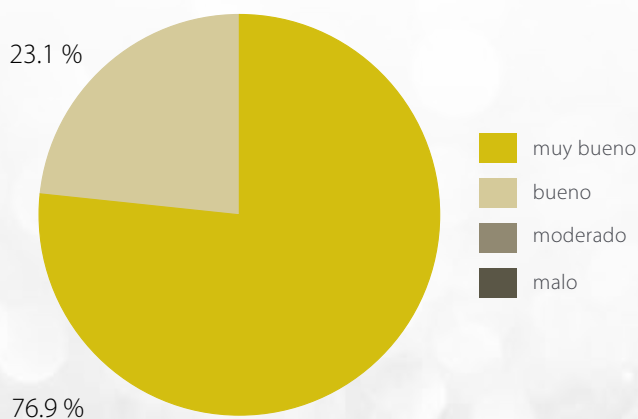

A través de un ensayo de campo con 39 dentistas de Europa y Estados Unidos se confirmó el excelente pulido de BRILLIANT EverGlow: el 100 % de los participantes lo valoraron positivamente, y el 76,9 % de ellos dieron al producto la máxima puntuación.

¹ Fuente: datos internos | * no es una marca registrada de COLTENE



RESTAURACIONES ESTÉTICAS CON UNA SOLA TONALIDAD CON TONOS UNIVERSALES¹

BRILLIANT EverGlow se integra armoniosamente en el entorno aplicando una única tonalidad para conseguir unas restauraciones altamente estéticas. A veces se puede aplicar una capa de esmalte adicional. En el caso de los pacientes muy

jóvenes, o en la remodelación de bordes incisales especialmente translúcidos, es posible recurrir a las tonalidades de esmalte. Esto es así gracias al desarrollo del sistema adaptativo «Duo Shade» de COLTENE. Gracias a sus excelentes

propiedades de fusión óptica, cada color cubre dos tonalidades VITA* a la vez, por ejemplo, A1/B1 o A2/B2.

* VITA no es una marca registrada de COLTÈNE/WHALEDENT

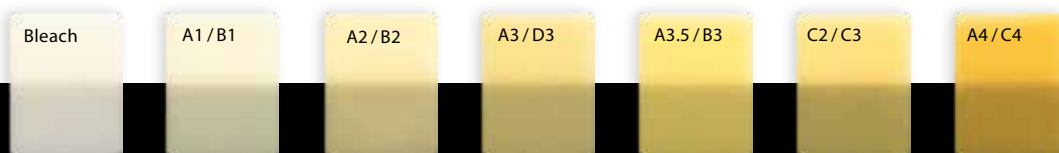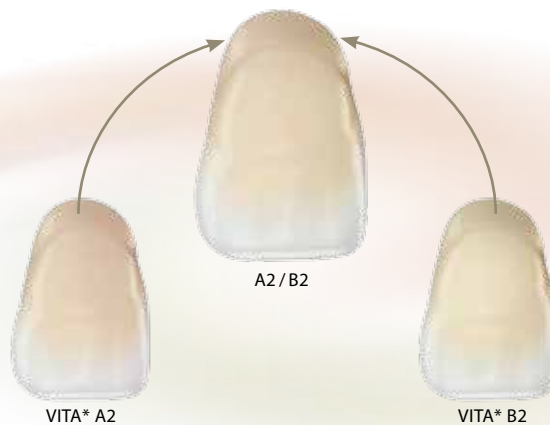

CASOS CLÍNICOS CON SÓLO COLORES UNIVERSALES¹



A2 / B2 

Situación inicial



Tratamiento



Tratamiento



Resultado final



UN SISTEMA FLEXIBLE PARA TODAS LAS INDICACIONES

BRILLIANT EverGlow es un sistema acertado y verdaderamente versátil con el que el dentista tiene la libertad necesaria para lograr unas restauraciones altamente estéticas. Además de las tonalidades universales, el sistema incluye dos tonos translúcidos que permiten la caracteriza-

ción individual de zonas del esmalte particularmente translúcidas. El sistema de color BRILLIANT EverGlow se completa con tres tonalidades opacas. Con ellas es posible enmascarar los dientes muy pigmentados y crean la base para una restauración estética.



- Gestión sencilla del color: una única tonalidad proporciona dos tonalidades VITA (sistema "Duo Shade")
- 7 tonalidades universales de composite adecuadas para los sectores anterior y posterior
- Tonalidades adicionales de esmalte y opacas para las restauraciones de mayor complejidad estética



Todas las imágenes: por cortesía del equipo de Styleitaliano
¹ Tonalidades "Dentin" para restauraciones de una única tonalidad

UNA CONSISTENCIA SUAVE PARA UNA MANIPULACIÓN IDEAL

Su consistencia suave y su estabilidad dimensional hacen de BRILLIANT EverGlow un material de obturación avanzado fácil y cómodo de aplicar en las cavidades. Las cúspides cuidadosamente modeladas, los bordes y los puntos de contacto permanecen intactos y no se hunden. La alta resistencia del composite a la exposición prolongada a las lámparas quirúrgicas completan una manipulación ideal.

La suave consistencia y la excelente humectabilidad de BRILLIANT EverGlow hacen que el material sea perfecto para la cementación de COMPONEER, el sistema de carillas directas de composite de COLTENE.




Sistema de carillas directas de composite COMPONEER

EXCELENTE HUMECTABILIDAD SOBRE LA SUPERFICIE DENTAL PREPARADA


ADHERENCIA AL INSTRUMENTO ¹

Medido en newtons

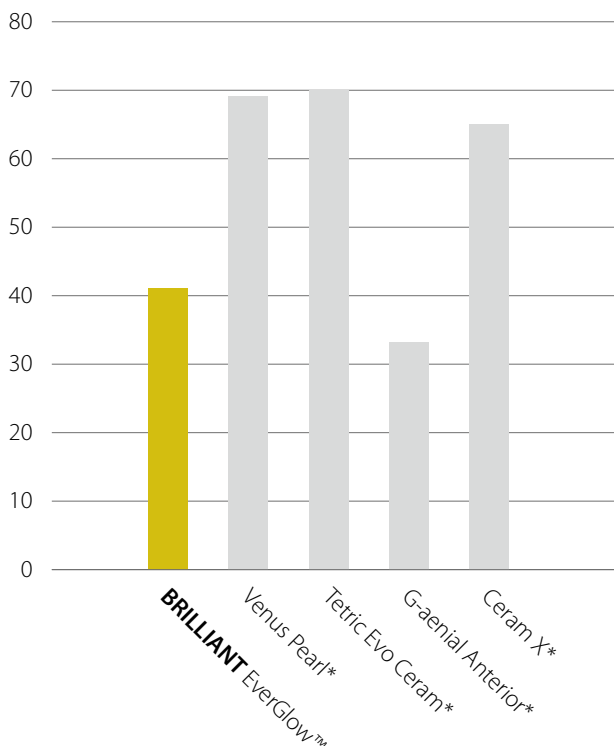

Gracias a su excelente humectabilidad, BRILLIANT EverGlow ofrece una unión excelente a las superficies dentales con adhesivo sin pegarse al instrumento. Esto también lo ha confirmado una encuesta internacional realizada entre los evaluadores. Más del 90 % de los participantes valoraron la humectabilidad como «muy buena» o «buena».

HUMECTABILIDAD SOBRE EL ADHESIVO ¹

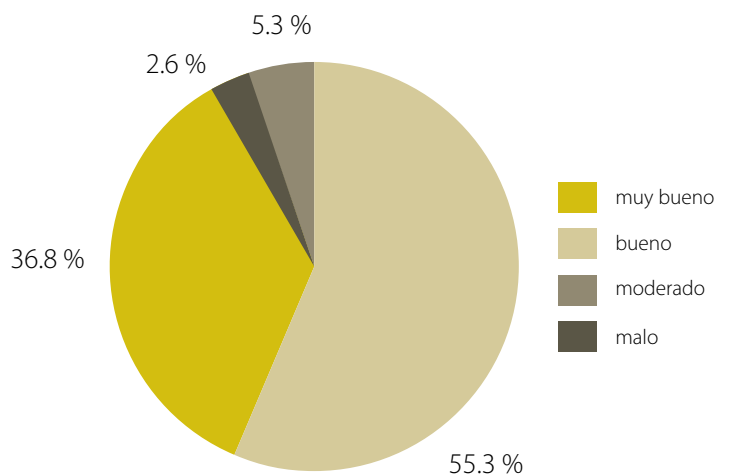


LA CLAVE PARA UNAS RESTAURACIONES BRILLANTES

LA TECNOLOGÍA DEL RELLENO DE BRILLIANT EVERGLOW

La tecnología de relleno de BRILLIANT EverGlow está orientada para proporcionar la combinación perfecta de comodidad en la manipulación, resistencia mecánica y estética duradera. Se basa en tres elementos clave: los rellenos submicrónicos de vidrio de bario aseguran un pulido excelente y la conservación del brillo, donde los rellenos prepolimerizados de BRILLIANT EverGlow reducen la contracción del volumen y mejoran la modelabilidad de la resina sin mermar su pulido ni su conservación del brillo gracias a su sofisticada composición, perfectamente adaptada a la del composite. Y, por encima de todo, las superficies del relleno están tratadas para garantizar la resistencia del compuesto dentro de la matriz de la resina y apoyar la conservación del brillo. El resultado es un compuesto de última generación que permite lograr unas restauraciones "brillantes".

ABRASIÓN MÍNIMA ¹


Pérdida relativa de volumen (sin dimensión)

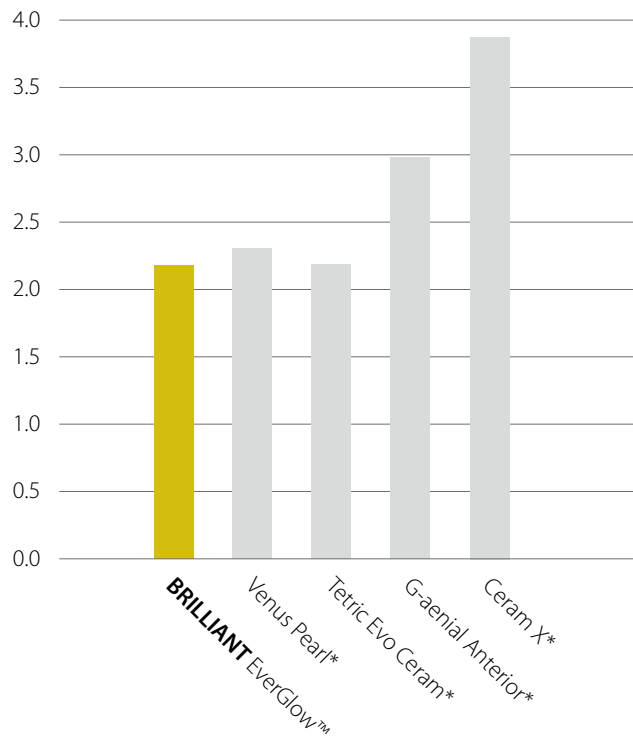

¹ Fuente: datos internos | * no es una marca registrada de COLTENE

SENCILLAMENTE IMPRESIONANTE

Imagen SEM de BRILLIANT EverGlow

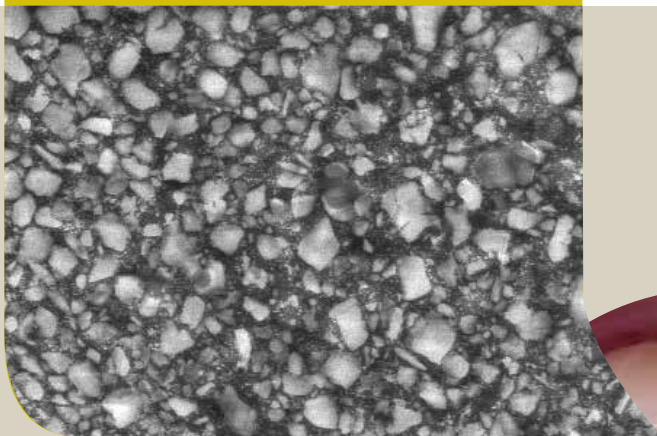


ABRASIÓN MÍNIMA

Comparado con otros composites convencionales, los valores de abrasión de BRILLIANT EverGlow son significativamente inferiores (véase el gráfico anterior).

ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Ideal para las restauraciones de los dientes posteriores por su alta resistencia a las fuerzas masticatorias.

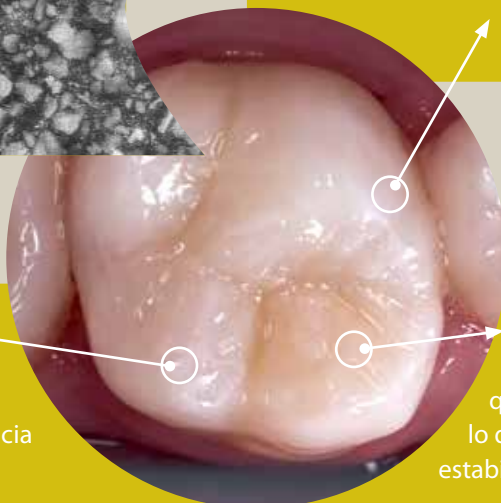

BAJA ABSORCIÓN DE AGUA

La composición optimizada hace que la absorción de agua sea baja, lo que contribuye a una excelente estabilidad del color a largo plazo.

INFORMACIÓN PARA PEDIDO



BRILLIANT EverGlow Kits	Opaque Shades			Universal Shades							Translucent Shades	
	Opaque Bleach (OBL)	Opaque A1 (OA1)	Opaque A3 (OA3)	Bleach (BL)	A1 / B1	A2 / B2	A3 / D3	A3.5 / B3	C2 / C3	A4 / C4	Bleach Translucent (BL Trans)	Translucent (Trans)
Kits de prueba												
6001 9720 4 jeringas de 3 g cada una						1	1	1				1
6001 9721 32 tips de 0,2 g cada uno						8	8	8				8
Kits para el sector anterior												
6001 9724 4 jeringas de 3 g cada una				1	1						1	1
6001 9725 32 tips de 0,2 g cada uno				8	8						8	8
Kits del sistema												
6001 9722 9 jeringas de 3 g cada una				1	1	1	1	1	1	1	1	1
6001 9723 60 tips de 0,2 g cada uno				5	8	8	8	8	5	5	5	8
Kits estándar												
6001 9726 9 jeringas de 3 g cada una		1	1		1	1	2	1	1			1
6001 9727 60 tips de 0,2 g cada uno		5	5		5	10	12	10	5			8
Kits para el sector anterior, grande												
6001 9728 9 jeringas de 3 g cada una	1	1		2	2	1					1	1
6001 9729 60 tips de 0,2 g cada uno	5	5		12	12	10					8	8

BRILLIANT EverGlow Tips de repuesto (20 x 0,2 g)

6001 9746 Opaque Bleach (OBL)
6001 9747 Opaque A1 (OA1)
6001 9748 Opaque A3 (OA3)
6001 9706 Bleach (BL)
6001 9707 A1 / B1
6001 9708 A2 / B2
6001 9709 A3 / D3
6001 9710 A3.5 / B3
6001 9716 C2 / C3
6001 9717 A4 / C4
6001 9718 Translucent (Trans)
6001 9719 Bleach Translucent (BL Trans)

BRILLIANT EverGlow Jeringas de repuesto (1 x 3 g)

6001 9743 Opaque Bleach (OBL)
6001 9744 Opaque A1 (OA1)
6001 9745 Opaque A3 (OA3)
6001 9697 Bleach (BL)
6001 9698 A1 / B1
6001 9699 A2 / B2
6001 9700 A3 / D3
6001 9701 A3.5 / B3
6001 9702 C2 / C3
6001 9703 A4 / C4
6001 9704 Translucent (Trans)
6001 9705 Bleach Translucent (BL Trans)



© 2016 Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com

Coltene Iberia S.L.U.
 c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
 28220 Majadahonda, Madrid / Spain
 T +34 91 63 86 492
 F +34 91 63 86 279
 info.es@coltene.com

Coltene/Whaledent AG
 Feldwiesenstr. 20
 9450 Altstätten / Switzerland
 T +41 71 757 53 00
 F +41 71 757 53 01
 info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
 235 Ascot Parkway
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
 T +1 330 916 8800
 F +1 330 916 7077
 info.us@coltene.com

COLTENE