HyFlex™ CM & EDM



Siempre por la vía correcta



HyFlex™EDM Mecanizado por Descarga Eléctrica

Las nuevas limas HyFlex EDM constituyen la 5.ª generación de limas endodóncicas. Las limas de NiTi HyFlex EDM tienen propiedades totalmente nuevas gracias a su innovador proceso de fabricación con mecanizado por descarga eléctrica o EDM. Al entrar en contacto el material de base y la herramienta eléctrica, se genera una potente descarga. Las chispas generadas durante este proceso hacen que la superficie del material se funda

Así es como se crea la superficie única de las nuevas limas de NiTi HyFlex EDM, ahora más fuertes y resistentes a la rotura. Esta combinación totalmente única de flexibilidad y resistencia a la rotura permite reducir el número de limas necesarias para la limpieza y el conformado durante las endodoncias sin comprometer la conservación de la anatomía del canal radicular.

Al igual que las limas HyFlex CM, las HyFlex EDM cuentan con el conocido efecto de memoria controlada o CM. De esta forma se obtienen unas propiedades muy similares en cuanto a regeneración y flexibilidad del material.

- → Hasta un 700 % más de resistencia a la rotura
- → Superficie especialmente endurecida
- → Permite instrumentar con un número reducido de limas

SECUENCIA PASO A PASO

ORIFICE OPENER (opcional) 25/.12

Lima Glidepath 10 / .05

Lima Preparación 20 / .05

OneFile

Casos clínicos

"Estas limas se desplazan muy bien en las curvas. Sin duda. ¡Me encantan!'

Dr. Antonis Chaniotis







Dr. Eugenio Pedullà










HyFlex™ 25 / ~


> **ACABADO** 40 /.04

LIMAS DE

- → Alta flexibilidad
- → Resistencia extrema a la fractura
- → Preparación del canal centrada

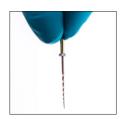

Las limas HyFlex se fabrican utilizando un proceso exclusivo en el que la fase cristalográfica transita de austenita a martensita a temperatura ambiente, a diferencia de las limas de NiTi convencionales, lo que permite que las limas sean extremadamente flexibles y resistentes a la rotura.

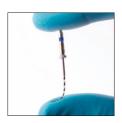

Gracias a la memoria controlada, las limas siempre siguen la anatomía del canal, reduciendo significativamente el riesgo de que se produzcan escalones, desplazamientos o perforaciones. Al igual que las limas de acero inoxidable, las limas HyFlex pueden doblarse previamente.



Resulta una ventaja crucial en los canales radiculares extremadamente curvos para evitar la creación de escalones.


Hasta un 700 % más de resistencia a la rotura

Las pruebas realizadas demuestran que las limas de NiTi HyFlex son significativamente más resistentes a la fatiga que las limas de NiTi convencionales. En las nuevas limas de NiTi HyFlex EDM, este efecto aumenta en un 300-700 %. El nuevo proceso de fabricación EDM permite un nuevo ajuste de forma y otra dureza de la superficie de la lima.

- → Resistencia a la fractura mediante inspección visual
- → Regeneración mediante tratamiento térmico

Las limas de NiTi HyFlex tienen memoria de forma integrada. Evitan el esfuerzo durante la preparación cambiando su forma en espiral. Recuperan su forma tras el tratamiento con calor. Un proceso de autoclavado normal basta para que las limas recuperen su forma original y regeneren las estructuras de cristal y la resistencia a la fatiga.

Si la lima no recupera su forma tras el tratamiento con calor, se deforma plásticamente, aumentando así el riesgo de rotura. Estas limas no deben utilizarse. Gracias a esta inspección visual, el número de usos de las limas es mayor que el de las limas de NiTi convencionales.

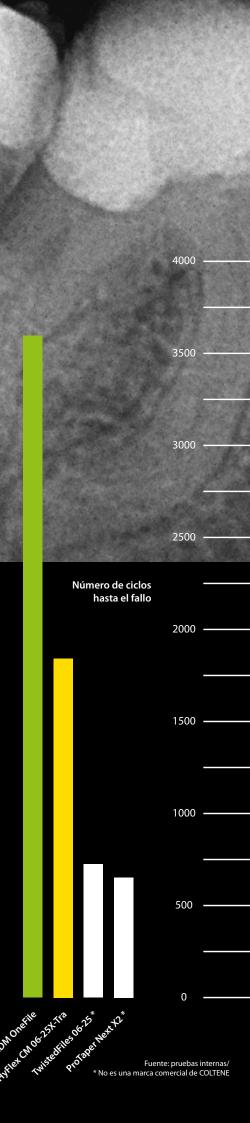



HyFlex[™]EDM Número reducido de limas

Según la situación clínica, el uso de las limas HyFlex EDM se reduce a 2-3 limas, especialmente en los canales rectos y más grandes.

Todas las limas de NiTi HyFlex EDM se pueden utilizar a 400 rpm y con un torque de hasta 2,5 Ncm (25 mNm), a excepción de las limas Glidepath, que se pueden utilizar a 300 rpm y con un par de apriete de hasta 1,8 Ncm (18 mNm)



CORONAL CENTRO APICAL 25/.08 Limas de 20/.04 25/.04 20/.06 30/.04 40/.04 HyFlex CM HyFlex CM HyFlex CM HyFlex CM HyFlex CM HyFlex CM

HyFlex[™]CM Técnica de longitud única

La técnica de longitud única, en la que se utilizan todas las limas, excepto la Orifice Opener corta, hasta la longitud de trabajo, permite la preparación precisa y anatómicamente exacta con las limas HyFlex CM.

De nuevo, se pueden utilizar todas las limas excepto la Orifice Opener hasta la longitud de trabajo (500 rpm; 2,5 Ncm (25 mNm)).

Regeneración mediante tratamiento térmico





HyFlex™GPF Lima Glidepath



Las HyFlex GPF garantizan un conformado óptimo de la trayectoria de acceso gracias a su memoria controlada. Se caracterizan por su excelente durabilidad y resistencia a la rotura.

A pesar de la extremada flexibilidad que permite que las limas sigan anatomías inusuales, las limas HyFlex Glidepath son muy fáciles de usar y garantizan la seguridad del tratamiento.



El kit de introducción Compact HyFlex CM es una opción idónea para empezar un tratamiento endodóncico de éxito. En este set compacto, la fiable secuencia HyFlex CM permite aplicar la técnica de longitud única e incluye puntas de gutapercha adaptadas al sistema. El set brinda un acceso óptimo a la alta calidad de la gama de productos COLTENE ENDO. El kit de iniciación Compact HyFlex

EDM incluye limas de cuatro tamaños para realizar con la máxima sencillez los tratamientos, especialmente en los canales rectos, hasta el tamaño ISO 40. Al igual que todas las limas de NiTi HyFlex, las HyFlex EDM están preesterilizadas para poder iniciar el tratamiento de inmediato junto con el pequeño y práctico organizador HyFlex y las puntas de gutapercha de mayor conicidad, de dimensiones precisas.

Kit de introducción HyFlex CM:

- 1 organizador HyFlex
- 1 Secuencia limas HyFlex CM 25 mm
- 1 Caja Surtida 20-45 de Puntas de Guttapercha Roeko conicidad 04

Kit de introducción HyFlex EDM:

- 1 organizador HyFlex
- 1 set simple de conformado HyFlex EDM + lima de acabado 40/.04
- 1 Caja Surtida 20-45 de Puntas de Guttapercha Roeko conicidad 04

HyFlex[™] Limas NiTi y accesorios

PREESTERILIZADAS





Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20 9450 Altstätten/Suiza T +41 71 757 53 00 F +41 71 757 53 01 info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30 89129 Langenau/Alemania T +49 7345 805 0 F +49 7345 805 201 info.de@coltene.com

COLTENE Iberia S.L.U. c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A

c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A 28220 Majadahonda, Madrid/Spain T +34 91 63 86 492 F +34 91 63 86 279 info.ib@coltene.com

(Pieza de mano motor, cargador, contraángulo)

(Pieza de mano motor, cargador, contraángulo AL)

Set completo CanalPro CL (con conector para Apex Locator)

Set completo CanalPro CL2 (pieza de mano motor, cargador, contraángulo)

© COLTENE – www.coltene.com

 TTT THE OTTER TO T			



HyFlex GPF Secuencia Contenido 25 mm 2 uds 15/01: 2 uds 20/02 60018753

Contenido			25 mm	
2 uds. 15/.01; 2 uds. 15/.02; 2 uds. 20/.	02		60018753	
Reposiciones de limas NiTi HyFlex (CM, 6 uds.			
Tamaño / cono	19 mm	21 mm	25 mm	31 mr
25/.08	60011048	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	
15/.04		60011049	60011065	6001828
20/.04		60011050	60011066	6001828
25/.04		60011052	60011067	6001828
30/.04		60011053	60011068	6001828
35/.04		60011054	60011069	
40/.04		60011055	60011070	6001828
			60011071	0001020
45/.04		60011056		
50/.04		60011057	60011072	6001828
60/.04		60011058	60011073	6001829
20/.06		60011059	60011074	6001829
25/.06		60011060	60011075	
20/.06, espirales X-tra		60018699	60018700	6001870
25/.06, espirales X-tra		60018702	60018703	6001870
30/.06		60011061	60011076	6001829
35/.06		60011062	60011077	
40/.06		60011063	60011078	6001829
Lima NiTi HyFlex CM Secuencia lon	gitud única			
Contenido/tamaños		21 mm	25 mm	31 mr
20/.04; 25/.04; 30/.04; 40/.04; 20/.06; 2	25/.08 19 mm	60011064	60011079	6001829
Lima NiTi HyFlex CM Secuencia cro	wn down			
Contenido/tamaños		21 mm	25 mm	31 mi
S (25/.08 19mm; 35/.04; 30/.04; 25/.04	; 20/.04; 15/.04)	60018689	60018692	6001869
M (25/.08 19mm; 60/.04; 50/.04; 45/.04; 40/.04; 35/.04)		60018690	60018693	6001869
L (25/.08 19 mm; 40/.06; 35/.06; 30/.06; 25/.06; 20/.06)		60018691	60018694	6001869
Kits de introducción HyFlex				
Kit de introducción Premium HyFlex	CM			6001953
(2 uds. organizador, 2 uds. secuencia				
Kit de introducción Compact HyFlex CM (organizador, secuencia 25 mm, ROEKO GP mayor conicidad)				
Kit de introducción Compact HyFlex 40/.04, ROEKO GP mayor conicidad)	EDM (organizador, set de	conformado HyFlex EDM + li	ma de acabado	6001966
Kit de Endo Highlight				
	EDM (10/05, 25/-, 25/12)	1 × POEKO GuttaElow bioso	al 2.5 ml	6002203
1 x Set simple de conformado HyFle: 1 x ROEKO puntas de Guttapercha H		, I X NOENO Gullariow biose	di 2,3 iiii,	6002203
Secuencias de limas NiTi HyFlex ED	М			
Contenido/tamaños		21 mm	25 mm	
Lima de conformado simple 10/.05; 25/~; 25/.12 15 mm		60022267	60019363	
Lima de conformado simple medio 10/.05; 20/.05; 25/~		60022277	60022278	
		60022268	60019364	
Set de acabado 40/.04; 50/.03; 60/.02		00022208	00019304	
Reposiciones de limas NiTi HyFlex I		24	25	
Tamaño / cono	15 mm	21 mm	25 mm	
Orifice Opener 25/.12	60019596			
Lima Glidepath 10/.05		60022269	60019594	
Lima Preparación 20/.05		60022275	60022276	
25/~ HyFlex OneFile		60022270	60019595	
Lima de acabado 40/.04		60022271	60019597	
Lima de acabado 50/.03		60022272	60019598	
Lima de acabado 60/.02		60022274	60019599	
Accesorios HyFlex				
Producto		Contenido		
Bloque de procedimiento endo		1 ud.		6001108
Organizador endo		1 ud.	·····	6001878
Bloques de práctica endo		3 bloques acrílicos		6001108
Pieza de mano inalámbrica CanalPı	ro			
			EU	Reino Unid
Set completo CanalPro CL (sin conec	tor nara Aney Locator		60011035	6001103
condition of the control			00011000	0001103

60014050

60019362